

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tejsavas kapszulához

Levendula kapszulához

Körömvirág/Zsálya kapszulához

Cickafark/Kakukkfű kapszulához

Felhasználás: Hüvelyöblítő készítmény, végbélbe nem használható !

Ajánlott:

- hüvelyi folyás esetén
- szexuális aktus okozta fertőzés, hámsérülés esetén
- uszodahasználat okozta gombás fertőzés esetén
- hámsérülések esetén
- antibiotikum szedése által okozott hüvelyi folyás enyhítésére
- serdülő vagy változó kori hormonális zavarok okozta hüvelyi problémák enyhítésére
- normál hüvelyi pH helyreállítására
- fertőzések megelőzésére

A kapszula használható :

- MedCare Intimzuhanyba helyezve vagy a
- Multifunkciós zuhany nyelébe helyezve az Intim applicátorral

Használatáról és annak gyakoriságáról kérdezze orvosát, gyógyszerészét.

A fólia felbontása után a kapszulát mielőbb el kell használni.

Felhasználásig száraz, hűvös helyen, gyermektől elzárva, lehetőleg gyógyszerek között kell tartani.

Használat módja:

- bontsa ki a légmentesen lezárt fóliából a kapszulát.
- a kapszulát helyezze a nyélbe
- a kezelőfejet a nyéllal (a kialakított bajonettzár segítségével) csavarja egymásba
- ügyeljen rá, hogy az összeillesztésnél a 2 elem pontosan záródjon.

Az eszköz csatlakoztatása a zuhanyra

- a zuhanycsőről csavarja le a zuhanyfejet
- csavarja a zuhanyfej helyére a fentiek szerint előre összeállított eszközt. Amennyiben Ön Multifunkciós zuhannyal rendelkezik, a kapszulát annak a nyelébe kell helyezni, és az intim applicátort a nyélre csavarni.

A víz hőmérsékletének a beállítása

- a kád vagy bidé csaptelepét helyezze normál kifolyóállásba
- állítsa be a kívánt vízhőmérsékletet, majd hagyja a vizet folyni.


A kezelés folyamata :

- győződjön meg, hogy a csaptelepből folyó víz hőmérséklete megfelelő
- amennyiben a vízhőmérséklet megfelelő, helyezze az irrigáló fejet a hüvelybe,

- csak ezután állítsa a csaptelep gombját zuhany funkcióra!
- a kezelés (előbb fertőtlenítő öblítés fiziológiai koncentrátumú sóoldattal , majd a kívánt hatóanyag bevitele) pár másodperc alatt megtörténik, majd a készülék működése automatikusan leáll
- húzza ki az eszközt a hüvelyből

Szét szerelés

- zárja el a vízcsapot
- csavarja szét az eszközt
- vegye ki a kiürült kapszulát, melyet a háztartási hulladékok közé dobhat
- az eszközt alaposan mossa el, majd tegye el
- csavarja vissza a zuhanyfejet a gégecsőre

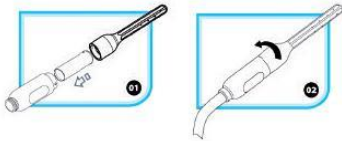

Beöntéshez keresse a Complex kapszulát !

**Az Intimzuhanyt és a kapszulákat keresse a Patikákban ,
DM üzletekben vagy a www.intimzuhany.hu oldalon.**