

Használati utasítás Multifunkciós zuhanyhoz

B048/1

MULTIFUNKCIÓS ZUHANY

Elegáns fürdőszobai kézi zuhany, amely különböző bőrápoló, hüvely és végbélkezelő kapszulákkal működik.

A Multifunkciós zuhanyt a fürdőszobai zuhany gégecsövére kell csavarni, mint bármely más zuhanyrózsát. A zuhany csatlakozása standard. A Multifunkciós zuhany kizárólag valamelyik MedCare kapszulával működik.

Felhasználási területek: Bőrkezelés
Hüvelykezelés
Végbélkezelés

BŐRKEZELÉS

Az eszköz összeszerelése

Bőrápolás esetén a zuhany rendelt, gél állagú bőrkezelő DERMA kapszulát zuhanyfejet kell a nyélre



nyélbe az orvos által készítménnyel megtöltött kell behelyezni és a csavarni.

Az eszköz használata

-Az összeszerelést követően kifolyó állásba és így állítsa be ezután állítsa át zuhany Ezután a Multifunkciós zuhany úgy működik, mint bármelyik fürdőszobai kézi zuhany.

-A zuhany használata során a kapszula folyamatosan adagolja a töltetet a kezelendő felületre.

-Használata csupán 3-5 másodpercig szükséges.

Nagyobb hatásfokot érhetünk el, ha a törölköző használatát megelőzően kezünkkel végigsimítjuk testünket, így segítve elő a töltet egyenletességét a bőrön.

A kapszula töltete több kezeléshez is elegendő lehet.

állítsa a csaptelepet a kívánt hőfokot, majd funkcióra.

Használati utasítás Multifunkciós zuhany intim applicátorral

Az eszköz összeszerelése intim kezeléshez

Intim kezelés alkalmával a intim kapszulát kell behelyezni a nyélhez csavarni.



zuhany nyélbe a kívánt és az intim applicátort kell

Külön applicátort kell hüvelykezeléshez és külön végbélkezeléshez !

használni a applicátort a

Az eszköz használata

1 kezelőfejet csak 1 személy használhat!

Az összeszerelést követően állítsa a csaptelepet kifolyóállásba, és így állítsa be a kívánt hőfokot.

-Helyezze az applicátorfejet a hüvelybe vagy a végbélbe. Végbélkezeléshez vizes alapú síkosító használata javasolt !

-Győződjön meg, hogy a víz hőmérséklete megfelelő, majd ezután állítsa a csaptelepet zuhany funkcióra.

-Az eszköz azonnal működésbe lép, és a kezelés egy percen belül meg is történik.

-A kezelés végeztével a készülék automatikusan leáll.

-Húzza ki az applicátort a hüvelyből vagy a végbélből.

-Zárja el a csapot, óvatosan csavarja le a nyélről a kezelőfejet.

-Vegye ki a kapszulát. A kapszula egyszer használatos, és a háztartási vagy szelektív szemétként dobható.

Ajánlott: hüvelyi folyás esetén
lokális gyógyszeres kezelés esetén
beöntéshez
végbélkezeléshez

Hüvelykezelő kapszulák:

Tejsavas kapszula
Levendula kapszula
Körömvirág/ Zsálya kapszula
Cickafark/Kakukkfű kapszula
Magisztrális kapszula (tölthető)

Végbélkezelő kapszula:

Complex kapszula

Beöntéshez, végbélkezeléshez csak a Complex kapszula használható !

Az eszköz használatáról és annak gyakoriságáról kérdezze orvosát, gyógyszerészét.

Figyelmeztetés: Gázbojleres működtetés esetén kérjük egy másik melegvízes csapot is megnyitni, hogy a készülék nyomása ne változzon.

Az eszköz fertőtlenítése Neomagnollal vagy bármely más, gyógyszerészeti műanyag felületfertőtlenítővel javasolt.

Amennyiben a víznyomás csökkenését tapasztalja, csavarja le a zuhanynyél végéről a csavarmenetet, és az oda beépített előszűrőt, mely a mechanikai szennyeződést szűri ki, mossa át, majd a végelemet csavarja vissza.

További információ:

www.intimzuhany.hu
info@medcareltd.com